

- Caricare il bite fotoluminescente sotto il caricatore UV per 60 secondi.
- Fig. 1 - Applicare uno strato di gel sbiancante nel bite fluorescente su tutto il perimetro interno in corrispondenza del lato con la forma dei denti (vestibolarmente).
- Fig. 2 e 3 - Ripiegare il bite e metterlo in bocca mordendolo delicatamente.
- Fig. 4 - Chiudere le labbra per ottenere una maggiore fluorescenza al buio.
- Lasciare agire per 15 minuti.
- Sciacquare con acqua.

Utilizzare per 7 giorni consecutivi. Oppure, con mascherine individuali, 6 ore durante la notte per 7 notti.

È consigliabile anche il protocollo misto (post igiene) con 3 giorni col bite luminoso e dal 4 giorno con le mascherine individuali notturne fino a terminare il gel nelle 3 siringhe. Il trattamento è ripetibile più volte all'anno.

